



Средства для самообслуживания и ухода за
инвалидами: насадки на унитаз:
арт. 10527L, арт. 10528, арт. 10528А, арт.
10528А/Т, арт. 10529, арт. 10540, арт. 10545.



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Руководство по сборке.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10529; 10527L; 10545; 10540. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Насадки на унитаз являются медицинским приспособлением, которые увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивает ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося гигиенического ударопрочного пластика, кроме модели 10540, которая выполнена из анодированного алюминия. Они подходят на унитазы любой формы, и для их сборки не требуются специальные инструменты.

1.2 Технические характеристики

Модель (артикул)	Максимальная нагрузка, кг	Масса, кг	Увеличение высоты унитаза, см	Габариты, см (ШхГ)
10528А	115	2,7	12	52х41
10528	115	2	12	41х41

10528A/T	115	1,8	12	50x40
10529	115	1,9	14	48x39
10527L	115	1	12	37x41
10545	115	1,6	8-18	38x40
10540	100	1,6	-	Высота: 60-80 см ШхГ: 45-55x45 см

1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528A/T), крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все элементы надежно закреплены.

2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.



Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528A/Т

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10529/10528A

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и деформаций.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами. Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Насадки на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10529; 10527L; 10545; 10540.
Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд” Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Регистрационное удостоверение от 21 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09869

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru